


FORBRAIN[®]

powered by **AFTERSHOKZ[®]**

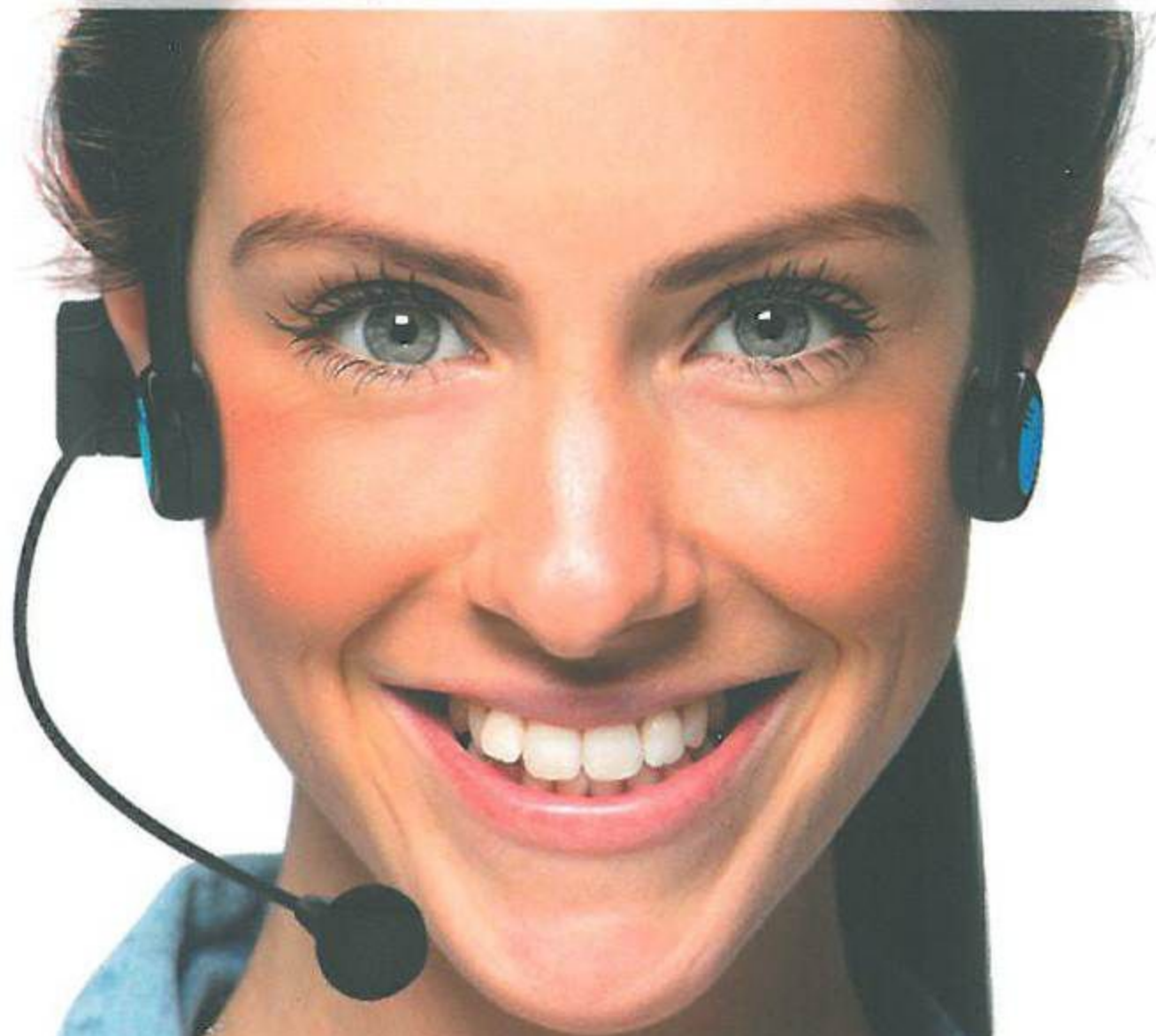

use your voice to boost your brain



FORBRAIN[®]

powered by **AFTERSHOKZ**

Opis elementów urządzenia



Akcesoria



Opis urządzenia

- Słuchawki przewodnictwa kostnego
- Mikrofon o wysokiej czułości
- Filtr dynamiczny pozwalający uzyskać kontrast percepcyjny

Głos jest jednocześnie: przechwytywany przez mikrofon, przetwarzany przez filtr dynamiczny w celu uzyskania kontrastu percepcyjnego i przekazywany za pomocą przewodnictwa kostnego z każdej strony kości skroniowej.

Korzystanie ze słuchawek

Umieść opaskę z tyłu szyi, tak by przetworniki opierały się o kości naprzeciwko uszu, a nie na uszach! Ustaw mikrofon naprzeciwko ust, w odległości co najmniej 3 cm.

Nie przykładaj mikrofonu zbyt blisko ust, gdyż może to powodować efekt sprzężenia zwrotnego!



Ładowanie



Podłącz FORBRAIN do standardowego portu USB komputera lub do ładowarki sieciowej za pomocą kabla USB. Ładowanie FORBRAIN zakończy się po 3 godzinach. Wskaźnik diodowy świeci intensywnie na czerwono podczas ładowania, a po zakończeniu ładowania samoistnie gaśnie.

Wskaźnik diodowy

Kolor	Status
Intensywnie niebieski	Normalny tryb pracy urządzenia
Niebieska lampka gaśnie, słuchawki są wyłączone	Zbyt niski poziom naładowania akumulatora
Intensywnie czerwony	Ładowanie słuchawek
Czerwona lampka gaśnie	Ładowanie zakończone